

КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

- КАЛЬЦЕТАТ
- КАЛЬЦЕСИЛ
- КАЛЬЦЕЛАЙТ
- КАЛЬЦЕВИТ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕСЕН

- БЕЛАИОД
- БЕЛСОЛ №3
- ВИТАДОНТ
- КП-ПЛАСТ
- ПАРАСЕПТ
- ФТОРАСЕПТ

ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

- ДЕСЕНСИЛ
ГЕЛЬ, ПАСТА, СПРЕЙ

ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРЕПАРИРОВАНИЕ КАРИОЗНЫХ ПОЛОСТЕЙ

- КАРИКЛИНЗ

ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

- АЛЮМОСИЛ
- АЛЮМОГЕЛЬ
- АЛЬВАНЕС
- КАПРАМИН
- РЕ-КОРД



АЛЬВАНЕС®

АЛЬВАНЕС® ПАСТА

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется как вяжущее средство при снятии зубных камней, кюретаже парадонтальных карманов, гингивэктомии и после снятия слепков.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Паста гемостатическая - рассасывающееся средство для альвеол, которое обволакивает кровоточащую поверхность и благодаря набуханию при контакте с кровью, оказывает давление на поврежденные капилляры, что в совокупности с действием аминокaproновой кислоты быстро останавливает кровотечение.

В состав гемостатической пасты «Альванес» входят: гидрохлорид лидокаина - местный анестетик, цетримид - сильный антисептик, гелеобразователь, аминокaproновая кислота - гемостатик.

Паста антисептическая - средство для альвеол, которое формирует барьер, препятствующий бактериальному заражению костной ткани альвеолярной лунки. Применяется для профилактики и лечения альвеолита.

В состав антисептической пасты «Альванес» входят: прополис (10%), йодоформ (5%), пчелиный воск, пастообразователь.

Наличие прополиса в составе материала обеспечивает противовоспалительное, ранозаживляющее и обезболивающее действие.

Входящий в состав йодоформ при соприкосновении с живыми тканями выделяет йод, оказывая антимикробное действие, активизируя образование грануляционной ткани, а также обладает вяжущими и противовоспалительными свойствами.

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется как гемостатическое средство при снятии камней, кюретаже пародонтальных карманов, гингивэктомии, выравнивании гребнеобразных альвеолярных отростков, обработке зубных лунок и после снятия слепков.

АЛЬВАНЕС® ПОРОШОК

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Мелкодисперсный антисептический порошок «Альванес», легко распыляется, покрывая кровоточащую поверхность слизистой и останавливает капиллярное кровотечение.

В состав порошка «Альванес» входят: природный пищевой полисахарид, образующий с кровью гель; альгинат натрия; ускоряющий образование сгустков крови; антисептик (йодоформ 0,01%).

Порошок «Альванес» нетоксичен, его можно совмещать как с антибиотиками, так и с антисептиками.

ФОРМА ВЫПУСКА

Паста гемостатическая	20 г
Паста антисептическая	3 г x 2 шт.
Порошок	7 г

АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
«Alvogyl» - «Septodont», Франция
«Alstase» - «Septodont», Франция
«Alveolex» - «Biodinamica», Бразилия

Паста для временной атравматичной ретракции десны
«Алюмосил»
РУ № ФСР 2010/07430 от 12.04.2010 г.



АЛЮМОСИЛ®

НАЗНАЧЕНИЕ

- временная атравматичная ретракция и осушение десны при восстановлении полости класса II и V;
- при получении точных оттисков и фиксации коронок и мостовидных протезов;
- осушение и раскрытие десневой бороздки при пародонтологическом лечении.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Материал «Алюмосил» представляет собой готовую к применению пасту, обладающую вяжущими и гемостатическими свойствами. Паста «Алюмосил» содержит: алюминий хлористый, определяющий вяжущее, гемостатическое и ретракционное свойства материала; инертный наполнитель, а также вкусовые и технологические добавки.

Паста, введенная в десневой карман или бороздку, обеспечивает ретракцию десны и эффективно осушает десневое поле. После применения паста легко удаляется воздушно-водной струей.

ФОРМА ВЫПУСКА

Паста	1,5 г
Канюля с пастой	0,3 г x 10 шт.

АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
«Expasyl» - «Pierre Rolland», Франция

● АЛЮМОГЕЛЬ

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется как гемостатическое средство при капиллярном кровотечении из десны, для ретракции десны при снятии слепков и лечении пришеечного кариеса, при проведении профессиональной гигиены, а также для обработки корневых каналов при апикальном кровотечении.



СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Материал «Алюмогель» выпускается в виде двух гелей: «Алюмогель» и «Алюмогель» форте. Гелевая форма позволяет применять материал точно, не растекаясь, при этом достигается максимальная концентрация гемостатика в зоне кровоизлияния.

Гемостатическое действие основного компонента гелей - алюминия хлористого многократно усиливает входящий в состав препарата центимониум бромид, который кроме того обладает бактерицидными свойствами.

Для более эффективного и быстрого гемостаза в гель «Алюмогель» форте введены соли железа.

Гемостатик «Алюмогель» форте с солями железа может временно изменить цвет ткани десны, который восстанавливается через 1-2 дня.

Гемостатические гели «Алюмогель» и «Алюмогель» форте не токсичны, просты в применении, не вызывают раздражений, легко смываются струей воды.

ФОРМА ВЫПУСКА

Гель

5 мл

АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
«Race gel» - «Septodont», Франция
«Alustat gel» - «Cerkamed», Польша

Набор стоматологических жидкостей для обработки слизистой оболочки полости рта
«БелСол»

РУ № ФСР 2009/04655 от 01.04.2009 г.

● БЕЛСОЛ®

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор жидкостей для обработки слизистой полости рта:

- **жидкость №1 (концентрат)** - для гигиенических и профилактических полосканий полости рта пациента перед стоматологическим приемом, а также перед снятием слепков (см. раздел «Профилактические материалы»);
- **жидкость №1 со фтором (концентрат)** - для фторирования и предотвращения кариеса зубов и заболеваний десен (см. раздел «Профилактические материалы»);
- **жидкость №2 (концентрат), жидкость №2 готовая к применению или гель №2** - предназначенные для профилактической и антисептической обработки слизистой поверхности при гингивите и начальных формах пародонтита, а также для обработки инфицированных каналов зубов и медикаментозной обработки кариозных полостей перед процедурой пломбирования, а также при наличии зубных протезов, брекетов и имплантатов (см. раздел «Эндодонтические материалы»);
- **жидкость №3 (концентрат)** - для полосканий при воспалительных процессах слизистой оболочки полости рта, при гингивите и пародонтите.



СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Жидкость №3 - эликсир на водной основе, содержащий комплекс биологически активных антиоксидантов (бета-каротин, витамин Е, витамин С), представляет собой прозрачную жидкость оранжевого цвета.

ФОРМА ВЫПУСКА

Жидкость №3 (концентрат)

20 мл

АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
«Race gel» - «Septodont», Франция
«Alustat gel» - «Cerkamed», Польша

БЕЛАИОД®



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для антисептической обработки слизистой оболочки полости рта (стоматиты, гингивиты, пародонтит), а также для обработки инфицированных корневых каналов.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Паста «Белаиод», активным компонентом которой является йод, обладает мощным бактерицидным эффектом в отношении стафилококков *candida*, *albicans* и т.п. является альтернативой антибиотикам при лечении пародонтита. Присутствие в пасте лецитина и глицерина смягчает и пролонгирует действие йода.

ФОРМА ВЫПУСКА

Паста

3 г

АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
«Iodo glycerin» - «Neo chemical dental», Япония

Паста-повязка на основе лецитина с комплексом витаминов для лечения
и профилактики гингивита и пародонтита «Витадонт»
РУ № ФСР 2011/10985 от 27.05.2011 г.

ВИТАДОНТ



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для лечения и профилактики гингивита и пародонтита.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

«Витадонт» - антибактериальная паста-повязка, представляет собой витаминизированный комплекс на основе воско-лецитиновой композиции, содержащий бета-каротин, витамин Е и С. Паста оказывает успокаивающее и обезболивающее действие.

Универсальная комбинация природных составляющих и биологически активных веществ восстанавливает мягкость и эластичность тканей пародонта. Комплекс витаминов (бета-каротин, витамин Е и аскорбиновая кислота) эффективно защищает слизистую полости рта от агрессивных прооксидантов - активных форм кислорода и свободных радикалов, а входящий в состав пасты «Витадонт» лецитин способствует быстрому усвоению витаминов.

Наряду с витаминным комплексом в состав пасты «Витадонт» входит ценнейший природный компонент – пчелиный воск. Лечебные компоненты пчелиного воска проникают внутрь десны и способствуют снятию болевых ощущений, дезинфицируют ротовую полость, оказывая губительное действие на микробы и вирусы, а вредные вещества из полости рта адсорбируются на воске.

ФОРМА ВЫПУСКА

Паста

15 г

АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
«Expasyl» - «Pierre Rolland», Франция

● ДЕСЕНСИЛ® – ВЛАДМИВА

В комплект «Десенсил-ВладМиВа» входят:

- **анестезирующий гель** для слизистой полости рта;
- **паста** для снятия гиперестезии зубов;
- **набор жидкостей** для снятия гиперестезии зубов (см. раздел «Профилактические материалы»).

АНЕСТЕЗИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ

НАЗНАЧЕНИЕ

«Десенсил-ВладМиВа» - **анестезирующий гель**

предназначен для:

- обезболивания места укола перед инъекцией, (деотермокоагуляция, иссечение);
- обезболивания при иссечении десны, при проведении простого кюретажа, а также для облегчения проведения рентгеновских снимков при повышенном рвотном рефлекс.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Основной компонент геля - лидокаина гидрохлорид (12%) - эффективно анестезирует и не оказывает аллергического действия на ткани.

Механизм действия лидокаина основан на ингибировании проникновения натрия в нервные волокна. Лидокаина гидрохлорид характеризуется более длительным периодом действия (в 2 раза превосходит новокаин) и лучшей переносимостью.

«Десенсил - ВладМиВа» гель выпускается с различными отдушками (мята, апельсин, лесная ягода, вишня, клубника).

ФОРМА ВЫПУСКА

Гель

5 мл / 60 г

ПАСТА

НАЗНАЧЕНИЕ

«Десенсил-ВладМиВа» - **паста** предназначена для:

- быстрого снятия симптомов гиперестезии зубов, вызванной дефектами эмали или эрозией;
- лечения повышенной чувствительности фронтальных зубов молочного прикуса, поврежденных «бутылочным кариесом»;
- снижения чувствительности зубов, возникшей в результате отбеливания, шлифования при установке коронок, стирания зубов при неправильной чистке щеткой и т.д.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

В состав пасты «Десенсил-ВладМиВа» входят:

- гидроксиапатит, реминерализующий эмаль;
- ионы калия и натрия, препятствующие передаче боли по нерву;
- ионы стронция, обеспечивающие длительную защиту твердых тканей зуба от чувствительности;
- лецитин, входящий в состав клеточных мембран и регулирующий перенос ионов и молекул через эти мембраны;
- звенол и наполнитель, обеспечивающие антисептические свойства препарата.

Паста «Десенсил-ВладМиВа» несколько часов удерживается на зубах, что обеспечивает пролонгированное воздействие лечебных компонентов на зубы с повышенной чувствительностью.

ФОРМА ВЫПУСКА

Паста

5 мл

● ДЕСЕНСИЛ® – ВЛАДМИВА АСПЕП

НАЗНАЧЕНИЕ

Жидкость предназначена для местного обезболивания с антисептической обработкой слизистой оболочки полости рта в следующих случаях:

- точки укола перед введением анестезирующего средства при удалении зуба (подвижного, молочного);
- перед удалением зубного камня;
- при припасовке коронок и мостовидных протезов;
- для устранения тошноты и рвотного рефлекса при снятии оттисков зубного ряда и при рентгенографическом исследовании;
- при вскрытии поверхностных абсцессов;
- при удалении гипертрофированных участков десны.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

В состав жидкости входит лидокаина гидрохлорид, цетримид, вспомогательные компоненты: пропиленгликоль, подсластитель, ароматизатор, вода дистиллированная. Лидокаина гидрохлорид (2-диэтиламино-2,6-ацетоксилидида гидрохлорид) - анестезирующее средство, оказывающее глубокое и быстрое обезболивающее действие на обрабатываемую поверхность.

Цетримид (цетилтриметиламмоний хлорид) - четвертичное аммониевое соединение, обладает противомикробной активностью в отношении грамположительных бактерий, в меньшей степени - в отношении грамотрицательных бактерий, вариабельной противогрибковой активностью, эффективен против вирусов. Жидкость имеет приятный вкус мяты.

ФОРМА ВЫПУСКА

Жидкость

30 мл

АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Xylogel» - «Septodont», Франция; «Xylocontact, creme» - «Pierre Rolland», Франция
«Anaestho Gel» - «Voco», Германия

КАЛЬЦЕВИТ

ПАСТА



Материал на основе гидроокиси кальция «Кальцевит» является многоцелевым препаратом и имеет две формы выпуска:

- **паста**, готовая к применению;
- **порошок**, затворяемый дистиллированной водой или физиологическим раствором (см. раздел «Эндодонтические материалы»).

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется в качестве лечебной прокладки для непрямого и прямого покрытия пульпы при лечении глубокого кариеса и обратимых форм пульпитов зубов биологическим методом (с сохранением жизнеспособности корневой пульпы).

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Паста «Кальцевит» содержит:

- высокодисперсную гидроокись кальция, которая создает высокий уровень pH среды (не менее 12,5), обеспечивая продолжительный бактерицидный эффект, а также стимулирует клетки пульпы к созданию дентинного мостика в месте ее обнажения, а одонтобласты - к созданию вторичного дентина;
- пастообразователь на водной основе, который обеспечивает глубокое проникновение материала в дентинные каналы и их запечатывание;
- фторид кальция, укрепляющий ткани зуба;
- рентгеноконтрастные добавки.

Лечение пастой «Кальцевит» дает хорошие результаты: за счет стерильности среды (вследствии щелочной реакции) и кальцификации дентинных каналов полностью прекращается доступ бактерий и продуктов их жизнедеятельности к пульпе, что предотвращает ее последующее инфицирование.

ФОРМА ВЫПУСКА

Паста

7 г

АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
«Calxyd» - «Spofa Dental», Чехия
«Calcipulpe» - «Septodont», Франция
«Cavity Liner» paste - «PD», Швейцария

Материал стоматологический подкладочный двухкомпонентный рентгеноконтрастный химического отверждения «Кальцесил»
РУ № ФСР 2008/03038 от 18.07.2008 г.



КАЛЬЦЕСИЛ®

НАЗНАЧЕНИЕ

Материал предназначен для выстилки глубоких полостей под различные виды постоянных пломб.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Материал «Кальцесил» двухкомпонентный (паста-паста) рентгеноконтрастный кальцийсодержащий материал химического отверждения. Обладает высокой клинической эффективностью (стимулирует дентиногенез в процессе и после лечения зуба, восстанавливает пластические функции пульпы), содержит:

- гидроокись кальция (50%), что способствует образованию вторичного дентинного слоя, восстановлению травмированной пульпы и сохраняет ее жизнеспособность;
- фосфаты и фторид кальция, укрепляющие ткани зуба;
- метилсалицилат, обеспечивающий антисептическое воздействие материала на микрофлору твердых тканей зуба, и образующий с кальцием хелатный комплекс;
- рентгеноконтрастную добавку, пастообразователь и высокодисперсный наполнитель.

ФОРМА ВЫПУСКА

Паста базисная

5 г / 13 г

Паста каталитическая

3 г / 11 г

АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
«Dycal» - «Dentsply», США
«Calcimol» - «Voco», Германия
«Cavity Liner» Compound - «PD», Швейцария
«Septocalcine ultra» - «Septodont», Франция

● КАЛЬЦЕЛАЙТ®

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется в качестве кальцийсодержащей подкладки для выстилания глубоких кариозных полостей (непрямая изоляция пульпы) под пломбы из стеклоиономерных и композитных материалов.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Материал «Кальцелайт» - однокомпонентный светотверждаемый, рентгеноконтрастный подкладочный материал, содержащий в своем составе гидроокись кальция, полимерное связующее (олигокарбонатметакрилат), рентгеноконтрастный наполнитель, инициаторы и активаторы фотополимеризации.

«Кальцелайт» позволяет предохранить пульпу от токсического воздействия материала постоянной пломбы, обладает стабильностью и низкой растворимостью, термоизолирующими свойствами, а также химическим сродством к полимерным материалам, которое обеспечивает высокую степень сцепления с композитами.

Контролируемое короткое время отверждения материала при неограниченном рабочем времени создает дополнительные удобства в его использовании.

ФОРМА ВЫПУСКА

Паста

1,5 г / 3,5 г

АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
«Ultra-blend plus» - «Ultradent», США
«Cavity Liner LC» - «PD», Швейцария



Материал полистеролкальцийсодержащий для изоляции полости зуба
от подкладочных композитных материалов «Кальцетат»
РУ № ФСР 2008/03515 от 23.10.2008 г.

● КАЛЬЦЕТАТ®

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяют для изоляции полостей перед внесением цементных подкладок, постоянных пломб и для обработки культи зуба перед цементированием коронок и мостовидных протезов.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Материал «Кальцетат» - суспензия белого цвета, в состав которой входят: гидроокись кальция, фторирующий компонент (фтористый кальций), пленкообразователь (полистирол, природные смолы) и легкоиспаряющаяся основа.

После нанесения суспензии и ее высушивания на твердых тканях зуба образуется сухая пленка с частицами наполнителя, гидроокиси и фторида кальция, которые вследствие различного размера и структуры придают пленке характерную шероховатость, что улучшает адгезию апплицируемого затем материала.

Образовавшаяся пленка плотно прилегает к тканям зуба, закрывая дентинные канальцы, и защищает дентин и пульпу зуба от вредных воздействий композитных материалов, создает химический барьер для кислот из пломбирочных материалов, снижает чувствительность зубов под амальгамами, а также снижает частоту возникновения вторичного кариеса.

ФОРМА ВЫПУСКА

Суспензия

5 мл

Растворитель

15 мл

АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
«Contrasil» - «Septodont», Франция



Средство вяжущее стоматологическое для обработки корневых каналов,
при капиллярном кровотечении «Капрамин»
РУ № ФСР 2010/06810 от 12.02.2010 г.

● КАПРАМИН®

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется как гемостатическое средство при капиллярном кровотечении из десны, для обработки зубных лунок и после прямого снятия слепков, для ретракции десны, при снятии камней, а также для обработки корневых каналов при кровотечении из канала.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Гемостатическое действие основного компонента материала «Капрамин» - алюминия хлористого - многократно усиливает входящий в состав препарата центимониум бромид, который обладает бактерицидными свойствами.

Материал «Капрамин» не токсичен, прост в применении, не вызывает изменения цвета приретенных и зубных тканей, легко смывается струей воды.

ФОРМА ВЫПУСКА

Жидкость

30 мл

АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
«Racestyptine» - «Septodont», Франция; «Alustat» - «Serkamed», Польша
«Hemostatic» - «PD», Швейцария





КАРИКЛИНЗ®

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор гелей «Кариклинз» предназначен как в детской, так и во взрослой стоматологии для размягчения кариозного дентина при среднем кариесе и кариесе корня, без повреждения здорового дентина.

Комплект специальных инструментов для ручного применения используется для удаления размягчённой ткани кариозного дентина без использования бормашины.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Материал «Кариклинз» представлен двумя гелями для последовательного применения. **Гель №1** содержит комплексообразователь твердых тканей, предназначенный для растворения деструктурированных минеральных компонентов кариозного дентина. Комплексообразователь растворяет нестойкие кальцийфосфаты и оксиапатит, при этом не повреждая здоровый дентин. В состав геля №1 входит антисептик - цетримид, проявляющий активное действие в отношении грамположительных, грамотрицательных и анаэробных бактерий.

Основное действующее вещество Геля №2 гипохлорит натрия - растворяет обнажённые коллагеновые волокна (органическую часть дентина). Благодаря размягчающему эффекту гелей, повреждённый и здоровый дентин становятся клинически легко разделимыми. Кариозно-повреждённый дентин можно эффективно и безопасно удалить с помощью специальных атравматических инструментов набора «Кариклинз», имеющих различную геометрическую форму рабочей части и угол заточки режущих граней 90°. Атравматическая прямоугольная заточка режущих кромок инструментов позволяет отнести их к «вычищающим», а не «вырезающим» и снижает риск удаления здорового дентина. При совместном использовании гелей и инструментов «Кариклинз» достигается максимальный результат химико-механического препарирования кариозных полостей. Применение гелей при кариесе эмали не эффективно.

ФОРМА ВЫПУСКА

Гель №1	3 г
Гель №2	3 г
Жидкость «Колор - тест»	10 мл
Инструменты	8 шт.

*Выпускается в комплекте
и отдельно набор гелей и инструменты.*

АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
«Carisolv» - «Medi Team», Швеция

Комплект пластин саморассасывающихся на основе природных полисахаридов для лечения воспалительных заболеваний десен и тканей пародонта КП-«Пласт»
 РУ № ФСР 2007/00994 от 25.10.2007 г.



КП-ПЛАСТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначены для лечения и профилактики кровоточивости и воспалительных заболеваний пародонта при гингивите и пародонтите.

Выпускаются:

- «КП-Пласт» - фито;
- «КП-Пласт» - вита;
- «КП-Пласт» - антимикробный;
- «КП-Пласт» - вайт.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

«КП-Пласт» - саморассасывающиеся пластины на основе природных полисахаридов позволяющие пролонгированно поддерживать необходимую терапевтическую концентрацию лекарственных веществ в пораженных тканях пародонта.

Пластины **«КП-Пласт» фито** изготовлены на основе полисахаридов и полипептидов природного происхождения. В состав пластин входят экологически чистые экстракты ромашки, календулы и тысячелистника.

Витамин К и соли кремниевой кислоты, входящие в состав тысячелистника, обуславливают кровоостанавливающее действие, повышают свертываемость крови. Экстракт ромашки оказывает противовоспалительное и противоаллергенное действие, а также способствует усилению регенераторных процессов слизистой оболочки ротовой полости. Календула оказывает бактерицидное действие на кокковую микрофлору, обладает хорошо выраженным противовоспалительным и эпителизирующим эффектом.

«КП-Пласт» вита содержат комплекс витаминов (С, Е, бета-каротин). Бета-каротин защищает клеточные структуры мягких тканей полости рта от разрушения свободными радикалами, оздоравливает и укрепляет десна. Витамин Е повышает тонус ослабленных кровеносных капилляров, способствует снижению кровоточивости и восстановлению тканей пародонта, ускоряет заживление ран слизистой оболочки полости рта. Витамин С способствует снижению проницаемости соединительной ткани и клеток капилляров, уменьшению межклеточных пространств, что не только снимает отечность, но и делает ткани слизистой полости рта недоступными для проникновения инфекционных агентов.

«КП-Пласт» антимикробный содержат метронидазол и хлоргексидин. Хлоргексидин оказывает быстрое и сильное бактерицидное действие на грамположительные и грамотрицательные бактерии. Сочетание хлоргексидина с метронидазолом эффективно в отношении анаэробных бактерий, колонизирующих ротовую полость.

«КП-Пласт» вайт самоклеящаяся полимерная пленка для отбеливания зубов на основе пероксида водорода 1,5%. Пластины бесцветны и незаметны на поверхности зубов, плотно приклеиваются к зубам, предотвращая выход действующих компонентов в полость рта. К концу курса отбеливания, помимо осветления до естественного цвета, на зубах появляется блеск.

ФОРМА ВЫПУСКА

Пластина 5 x 10 см	2 шт.
--------------------	-------

АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
«Диплен-Дента» - «Норд-Ост», Россия

● ПАРАСЕПТ

НАЗНАЧЕНИЕ

- в качестве лечебно-защитного компресса при локальной форме пародонтита;
- временного пломбирования зубов;
- оттеснения десны в пришеечной области перед пломбированием.

В качестве нейтральной основы паста может быть применена с другими лекарственными препаратами (метронидазол, иодоформ и т.п.), способствуя удержанию их на уровне десны, зуба или альвеол.



СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Пластичная самотвердеющая паста, содержащая волокна в своей массе, приготовлена на основе порошка цинксульфатного цемента, не содержит эвгенола. Обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

В полости рта паста остается пластичной в течение 2-3 минут после нанесения на обрабатываемый участок, окончательное отверждение пасты происходит через 20-30 минут. «Парасепт» защищает лечебные пасты от действия слюны.

ФОРМА ВЫПУСКА

Паста

60 г

«АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ»
«Septo-pack» - «Septodont», Франция

● ПАРАСЕПТ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется в виде лечебного компресса при язвенно-некротическом гингивите, хроническом пародонтите, при пародонтальных абсцессах, после хирургических вмешательств на пародонте, а также для временного пломбирования зубов.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

«Парасепт» антисептический представляет собой безэвгенольную пластичную пасту, на основе порошка цинксульфатного цемента и биосовместимого волокнистого наполнителя. Лечебное действие пасты обусловлено наличием в ее составе метронидазола, активного в отношении грамположительных, грамотрицательных и анаэробных бактерий. «Парасепт» антисептический эффективно действует на патогенную флору, останавливая воспалительный процесс.



ФОРМА ВЫПУСКА

Паста

60 г

«АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ»
«Septo-pack» - «Septodont», Франция



РЕ-КОРД

НАЗНАЧЕНИЕ

Нить применяется для ретракции десны, а также для устранения десневого просачивания во время препарирования полостей, расположенных в пришеечной области зуба.

Жидкость применяется при апикальных и десневых кровотечениях, а также для пропитывания необработанных нитей.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Набор «Ре-Корд» состоит из ретракционной жидкости для тампонирования и нитей различной толщины:

№ 1 - тонкой; **№ 2** - средней; **№ 3** - толстой.

Выпускаются нити (обработанные), содержащие ретракционные компоненты, а также нити необработанные.

Терапевтический эффект жидкости «Ре-Корд» связан с вяжуще-сокращающими свойствами хлористого алюминия, входящего в состав. Ретракция (сжатие и открепление) десны носит временный характер (в течение 30 минут). Затем мягкие ткани восстанавливают свою первоначальную форму.

Ретракционная нить «Ре-Корд» представляет собой готовую к применению форму: скрученные хлопковые волокна, обработанные по специальной технологии.

Необработанные нити легко пропитываются жидкостью «Ре-Корд» непосредственно перед проведением ретракции.

Применение жидкости «Ре-Корд» перед снятием слепков позволяет получить отпечатки с четко обозначенными краями шеек отпрепарированных зубов, применение ретракционной нити позволяет без кровотечения поставить матрицы или другие приспособления в межзубный промежуток.

ФОРМА ВЫПУСКА

Комплект:

Ретракционная жидкость 5 мл

Ретракционная нить (необработанная) №1 или №2 или №3 2 м

Комплект:

Ретракционная жидкость 15 мл

Ретракционная нить (необработанная) №1 + №2 + №3 по 2 м

Выпускаются отдельно:

Ретракционная жидкость 5 мл

Ретракционная нить (обработанная) №1 или №2 или №3 2 м

АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
 «Racestypine» - «Septodont», Франция
 «Retracord» - «PsP Dental», Англия

Материал стоматологический для антисептической обработки тканей пародонта и профилактики кариеса «ФторАсепт»
 РУ № ФСР 2007/00834 от 09.10.2007 г.



ФТОРАСЕПТ®

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для лечения воспаления и кровоточивости десен, слизистой полости рта под съемным зубным протезом, а также профилактики кариеса зубов, гиперестезии и гипоплазии, некариозных повреждений эмали зубов.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Входящий в состав геля «ФторАсепт» аминофторид - наиболее действенный носитель ионов фтора, обеспечивающий оптимальную концентрацию активного фтора на поверхности твердых тканей зубов и оказывающий противокариесное действие. Образуя на поверхности зуба высокостабильный защитный слой, предотвращающий потерю кальция, не растворяющийся в кислотах и устойчивый к действию слюны, аминофторид уменьшает проницаемость зубной эмали. Гель с аминофторидом воздействует на твердые ткани зубов эффективнее и быстрее, чем гели с другими источниками фтора. Обладая поверхностной активностью, аминофторид защищает твердые ткани зубов от образования зубного налета.

Хлоргексидин - антисептик, активный в незначительных концентрациях и обладающий широким спектром действия в отношении грамположительных, грамотрицательных бактерий и грибковой флоры. Благодаря остаточной активности, он обеспечивает длительность бактерицидного эффекта на микроорганизмы, образующие зубной налет, способствующий предупреждению и лечению гингивитов, уменьшает воспаление десен.

Природный бетаин, входящий в состав геля, обладает свойствами защиты живых клеток, а также легко транспортирует воду для их увлажнения, что полезно для водного баланса слизистой оболочки полости рта и снятия симптома сухости во рту.

Гель «ФторАсепт» обладает приятными вкусовыми свойствами.

ФОРМА ВЫПУСКА

Гель

10 г

АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
 «Elmex glee» - «GABA», Швейцария