

# РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ РАСТВОРАМИ СРЕДСТВА «ДЕЛЬСАН-ДЕЗ» ДЛЯ ПАЛАТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ЛПУ НЕИНФЕКЦИОННОГО ПРОФИЛЯ, АМБУЛАТОРНЫХ КАБИНЕТОВ ПОЛИКЛИНИК И СТАЦИОНАРОВ

(кроме манипуляционных)

(разработано на основании инструкции № 3/13 по применению средства «Дельсан-Дез»)

Объект	Концентрация, экспозиция	Способ приготовления 1 литра рабочего раствора	Применение
<b>Текущая уборка</b>			
Поверхности (оборудование, мебель, стены, двери, полы)	0,2% экспозиция 15 минут	2 мл «Дельсан-Дез» 998 мл воды	Протирание, расход 100 мл на кв.м.
Санитарно-техническое оборудование	0,5% экспозиция 30 минут	5 мл «Дельсан-Дез» 995 мл воды	Протирание, расход 150 мл на кв.м., после экспозиции – смыть водой
Уборочный инвентарь	2% экспозиция 60 минут	20 мл «Дельсан-Дез» 980 мл воды	Замачивание, после экспозиции ополаскивание и сушка
Предметы ухода за больным, не загрязненные кровью	0,5% экспозиция 30 минут	5 мл «Дельсан-Дез» 995 мл воды	Протирание или погружение, после экспозиции ополаскивание и сушка
<b>Генеральная уборка – 1 раз в месяц</b>			
Генеральная уборка	0,2% 15 минут	2 мл «Дельсан-Дез» 998 мл воды	Протирание, расход 100 мл на кв.м.
<b>Изделия медицинского назначения многократного применения</b>			
Дезинфекция совмещенная с ПСО	1% экспозиция 30 минут	10 мл «Дельсан-Дез» 990 мл воды	Замачивание при полном погружении, после экспозиции мойка, ополаскивание и сушка
<b>Дезинфекция медицинских отходов класса Б</b>			
Перевязочный материал, салфетки, ватные тампоны	1% экспозиция 30 минут	10 мл «Дельсан-Дез» 990 мл воды	Замачивание с последующей утилизацией
Изделия медицинского назначения однократного применения (например: шпателя; насадки для датчиков УЗИ; одноразовое белье с биологическими загрязнениями и т.д.)	0,5% экспозиция 30 минут	5 мл «Дельсан-Дез» 995 мл воды	Замачивание с последующей утилизацией

## ПРИМЕЧАНИЯ:

- Срок годности рабочих растворов 30 дней, растворы для дезинфекции ИМН можно использовать многократно, если их внешний вид не изменился (при изменении цвета, помутнения раствора и т.п. раствор необходимо заменить).
- Все емкости с дез.средствами должны быть снабжены крышками, иметь маркировку (наименование, концентрация, назначение средства; дата приготовления, предельный срок годности)



# РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ РАСТВОРАМИ СРЕДСТВА «ДЕЛЬСАН-ДЕЗ» ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЛПУ КЛАССОВ ЧИСТОТЫ А И Б (операционные, перевязочные, родильные залы, процедурные, манипуляционные, стерилизационные и т.д.)

(разработано на основании инструкции № 3/13 по применению средства «Дельсан-Дез»)

Объект	Концентрация, экспозиция	Способ приготовления 1 литра рабочего раствора	Применение
<b>Текущая уборка</b>			
Поверхности (оборудование, мебель, стены, двери, полы)	0,5% экспозиция 30 минут	5 мл «Дельсан-Дез» 995 мл воды	Протирание, расход 100 мл на кв.м.
Санитарно-техническое оборудование	0,5% экспозиция 60 минут	5 мл «Дельсан-Дез» 995 мл воды	Протирание, расход 150 мл на кв.м., после экспозиции – смыть водой
Уборочный инвентарь	1,5% экспозиция 30 минут	15 мл «Дельсан-Дез» 985 мл воды	Замачивание, после экспозиции ополаскивание и сушка
Предметы ухода за больным	1% экспозиция 30 минут	10 мл «Дельсан-Дез» 990 мл воды	Протирание или погружение, после экспозиции ополаскивание и сушка
<b>Генеральная уборка – 1 раз в неделю</b>			
Генеральная уборка	0,5% экспозиция 30 минут	5 мл «Дельсан-Дез» 995 мл воды	Протирание, расход 100 мл на кв.м.
<b>Изделия медицинского назначения многократного применения</b>			
Дезинфекция совмещенная с ПСО	1% экспозиция 30 минут	10 мл «Дельсан-Дез» 990 мл воды	Замачивание при полном погружении, после экспозиции мойка, ополаскивание и сушка
<b>Дезинфекция медицинских отходов класса Б</b>			
Перевязочный материал, салфетки, ватные тампоны	1% экспозиция 30 минут	10 мл «Дельсан-Дез» 990 мл воды	Замачивание с последующей утилизацией
Изделия медицинского назначения однократного применения	0,5% экспозиция 30 минут	5 мл «Дельсан-Дез» 995 мл воды	Замачивание с последующей утилизацией

## Примечания:

- Срок годности рабочих растворов 30 дней, растворы для дезинфекции ИМН можно использовать многократно, если их внешний вид не изменился (при изменении цвета, помутнения раствора и т.п. раствор необходимо заменить).
- Все емкости с дез.средствами должны быть снабжены крышками, иметь маркировку (наименование, концентрация, назначение средства; дата приготовления, предельный срок годности)

